



ELISA ADAMTS-13 Antigen

ELISA-Komplettkit zur Bestimmung von humanem ADAMTS-13.

Testprinzip

Die verdünnten Proben werden in Mikrotiterplattenvertiefungen, die mit monoklonalen Anti-ADAMTS-13-Antikörpern beschichtet sind, inkubiert. Nach der Bindung des vorhandenen ADAMTS-13 an die Capture Antikörper werden ungebundene Substanzen durch Waschen entfernt. Ein zweiter, Peroxidase-konjugierter Anti-ADAMTS-13-Antikörper wird hinzugefügt, der gebundenes ADAMTS-13 erkennt. Nach einem Waschschrift reagiert zugegebenes Enzymsubstrat mit dem Konjugat. Die Intensität der entstehenden Farbe ist dem Gehalt an ADAMTS-13 in der Probe direkt proportional.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Mikrotitervertiefungen	12x8	Verfalldatum bei 2-8°C
Waschpuffer (10-fach)	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C
Inkubationspuffer	1 Fl.	2 Monate bei 2-8°C
Kalibratoren 1-5	je 1 Fl.	6 Monate bei -20°C
Kontrolle high, low	je 1 Fl.	6 Monate bei -20°C
Konjugat	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C
TMB-Substrat	1 Fl.	Verfalldatum bei 2-8°C
Stopplösung	1 Fl.	Verfalldatum bei 2-8°C

Anzahl der Bestimmungen: 96
Artikel Nr.: 5450601

Zusätzlich erhältlich

ELISA ADAMTS-13 Antigen Kalibrator Set	5 x 0,5 ml
Artikel Nr.:	5450661
ELISA ADAMTS-13 Antigen Kontroll Set	2 x 0,5 ml
Artikel Nr.:	5450663