



## LA CONFIRM (DRVVT)

Test zur Bestätigung von Lupus Antikoagulanzen (LA) im Plasma, nach positivem Ergebnis im LA SCREEN.

### Testprinzip

LA CONFIRM basiert wie LA SCREEN auf der DRVVT-Methode. LA CONFIRM enthält Phospholipide im Überschuß, die vorhandene Anti-Phospholipid-Antikörper neutralisieren. Die verlängerten Gerinnungszeiten im LA SCREEN werden korrigiert. Die Anwesenheit von Phospholipid-abhängigen Inhibitoren wird somit bestätigt. Die Ratio der Ergebnisse LA SCREEN (in Sekunden) und LA CONFIRM (in Sekunden) des entsprechenden Patienten wird gebildet. Eine Ratio > 1,2 bestätigt die Anwesenheit von Lupus Antikoagulanzen.

### Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

LA CONFIRM	5 Fl.	1 Monat bei -20°C
		48 Stunden bei 2-8°C
		24 Stunden bei 20-25°C
		8 Stunden bei 37°C

<b>Packungsgröße:</b>	<b>5 x 1 ml</b>
<b>Automatenadaptionen:</b>	<b>auf Anfrage</b>
<b>Artikel Nr.:</b>	<b>5343016</b>